

# ECOLAB® PLAN HIGIENY DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Co?	Kiedy?	Jak?	Czym?	Kto?
<p><b>ręce</b></p> <p>- strona brudna</p> <p>- strona czysta</p>	<p>przed rozpoczęciem pracy po wizycie w toalecie lub po skażeniu</p> <p>przed przerwą w pracy po skończonej pracy przed rozpoczęciem pracy po przerwie w pracy</p>	<p>odkażanie higieniczne rąk: w suche ręce wcierać 3 ml preparatu odkażającego przez 30 sekund</p> <p>w przypadku zabrudzeń ręce umyć, osuszyć;</p> <p>ręce regularnie pielęgnować</p>	<p>odkażenie: Skinman soft Spitaderm Skinman intensiv</p> <p>mycie: Manisoft Skinman scrub Seraman medical Seraman Sensitiv foam</p> <p>pielęgnacja: Silonda Silonda lipid</p>	
<p><b>narzędzia chirurgiczne, materiał operacyjny odporny na wysokie temperatury</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>kosze z narzędziami wyjąć z wózków kontenerowych (narzędzi nie należy przepakowywać!), umieścić w myjni-dezynfektorze lub myjni tunelowej</p> <p>pielęgnacja manualna</p>	<p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNP lub Sekumatic FNZ</p> <p>Pielęgnacja: Sekumatic FTP lub Sekumatic IS</p>	
<p><b>instrumenty chirurgii mikroinwazyjnej /MIC/</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>dezynfekcja i mycie wstępne w myjkach ultradźwiękowych</p> <p>następnie narzędzia ułożyć w pojemnikach i umieścić w myjni-dezynfektorze</p> <p>pielęgnacja manualna</p>	<p>Sekusept pulver 2% + 0,5% aktywatora</p> <p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNP lub Sekumatic FNZ</p> <p>Pielęgnacja: Sekumatic IS</p>	
<p><b>instrumenty mikrochirurgiczne</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>dezynfekcja i mycie wstępne w myjkach ultradźwiękowych</p> <p>następnie narzędzia ułożyć w pojemnikach i umieścić w myjni-dezynfektorze</p> <p>pielęgnacja manualna</p>	<p>Sekusept pulver 2% + 0,5% aktywatora</p> <p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNP lub Sekumatic FNZ</p> <p>Pielęgnacja: Sekumatic IS</p>	
<p><b>narzędzia stomatologiczne</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>dezynfekcja i mycie wstępne w myjkach ultradźwiękowych</p> <p>następnie narzędzia ułożyć w pojemnikach i umieścić w myjni-dezynfektorze</p> <p>pielęgnacja manualna</p>	<p>Sekusept pulver 2% + 0,5% aktywatora</p> <p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNP lub Sekumatic FNZ</p> <p>Pielęgnacja: Sekumatic FK lub Sekumatic IS</p>	
<p><b>endoskopy sztywne</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>umieścić w specjalnych pojemnikach i umieścić w myjni-dezynfektorze</p>	<p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNP lub Sekumatic FNZ</p>	
<p><b>endoskopy giętkie</b></p>	<p>natychmiast po dostarczeniu</p>	<p>umieścić w specjalnej myjni-dezynfektorze</p>	<p><b>Dezynfekcja chemo-termiczna /60°C/</b></p> <p>Mycie: ETD Cleaner</p> <p>Dezynfekcja: ETD Desinfectant</p>	
<p><b>osprzęt anestezyjologiczny</b></p>	<p>po dostarczeniu</p>	<p>włożyć do pojemników na sprzęt anestezyjologiczny lub specjalnych koszy i umieścić w myjni-dezynfektorze</p>	<p><b>Dezynfekcja termiczna /93°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FR lub Sekumatic FRE*</p> <p>Neutralizacja: Sekumatic FNZ</p> <p><b>Dezynfekcja chemo-termiczna /60°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FRE</p> <p>Dezynfekcja: Sekumatic FD</p>	
<p><b>pojemniki kontenery</b></p>	<p>po opróżnieniu</p>	<p>umieścić w myjni-dezynfektorze</p>	<p><b>Dezynfekcja chemo-termiczna /60°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FRE</p> <p>Dezynfekcja: Sekumatic FD lub Mycie + dezynfekcja: Sekumatic FDR</p>	
<p><b>obuwie operacyjne</b></p>	<p>codziennie przed użyciem</p>	<p>włożyć do pojemników na obuwie, załadowane wsady umieścić w myjni-dezynfektorze</p>	<p><b>Dezynfekcja chemo-termiczna /60°C/</b></p> <p>Mycie: Sekumatic FRE</p> <p>Dezynfekcja: Sekumatic FD lub Mycie + dezynfekcja: Sekumatic FDR</p>	
<p><b>powierzchnie robocze, wyposażenie, podłogi</b></p>	<p>codziennie, pod koniec pracy</p>	<p>mycie dezynfekujące poprzez pocieranie, mycie powierzchni pokryć roztworem preparatu</p> <p>miejsca trudno dostępne należy spryskiwać</p>	<p>Incidin Plus 2%</p> <p>Incidin Rapid 0,5%</p> <p>Medicarine 0,18%</p> <p>Incidur Spray</p> <p>Incidin Liquid Spray</p>	

\* w przypadku preparatu myjącego o obojętnym pH neutralizacja nie jest bezwzględnie wymagana. Zastosowanie preparatu neutralizującego zapobiega powstawaniu przebarwień i zmian korozyjnych, mogących wystąpić w przypadku posługiwania się wodą o złej jakości. Mycie + dezynfekcja: Sekumatic FDR

Oferujemy kompletną paletę produktów oraz systemy gwarantujące utrzymanie wysokiego standardu higieny instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemysłowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy. Ecolab - Państwa partner w dziedzinie higieny!

Ecolab Sp. z o.o.  
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków  
tel.: 012/ 2616 100; fax: 012/ 2616 101

**ECOLAB®**

PHCS10/2002